

Návod na používání zvětšovače penisu ProExtender

www.shop.svadeni.cz

[Zvětšovač penisu Profesionální Extender](#)

Penis Enlargement Device



User Manual

Jak používat

- Sestavte všechny části dohromady podle výše uvedeného diagramu.



- Když je penis v klidovém stavu, stáhněte předkožku směrem k tělu a následně penis natáhněte ven.
- Připevněte kroužek na základnu penisu. Natáhněte penis ven a poté umístěte žalud (špičku penisu) na přední část zařízení.
- Přitlačte zařízení pevně směrem k tělu a upevněte fixační pásek na penis. Fixační pásek by měl být pohodlný a neměl by být příliš těsný. Předkožku stáhněte směrem k tělu, aby byla mimo cestu.



1. Adjust the extension rods according to the penis length



2. Fix the front piece and fixing strap onto the extension rods



3. Fix the penis onto the penis enlargement device



4. The penis enlargement device starts to work

Jak zařízení funguje

- Po 20. roce věku se vývoj těla zastavuje, což platí i pro mužské reprodukční orgány.
- K regeneraci buněk penisu po 20. roce života je třeba penis neustále natahovat a stimulovat, což umožňuje jeho růst.


- Zařízení na zvětšení penisu využívá přirozenou trakci, která nutí buňky se reprodukovat díky tlaku z trakce. Tímto způsobem může penis růst větší a silnější díky nárůstu nových buněk.
- Trakce může také narovnat zakřivený penis a zvětšit jeho velikost.

Funkce zařízení

- Zařízení je pohodlné na nošení a navrženo dle ergonomických principů.
- Je určeno pro zvětšení a prodloužení velikosti penisu a zajištění silnější a výkonnější erekce bez nutnosti operace.
- Trvalá trakce podporuje buněčné dělení a reprodukci, což vede ke zvětšení a rozšíření penisu. Výsledek: větší sebevědomí.

Návod na nastavení a používání

- Po nasazení zařízení lze sílu trakce snadno upravit otočením dvou šroubů směrem dovnitř.

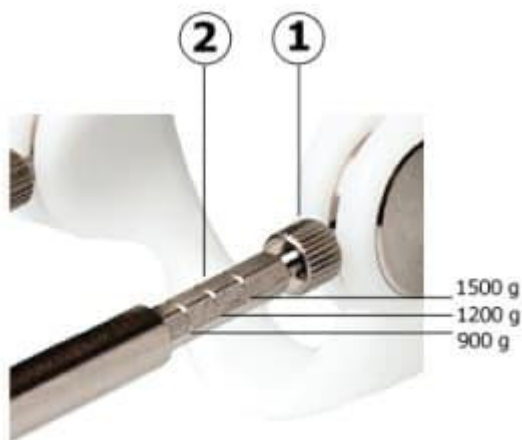

- Síla trakce může být nastavena mezi 900, 1200 nebo 1500 g (viz obrázek výše).
- Doporučuje se začít s 900 g během prvních 2–3 týdnů a zařízení nosit maximálně 4–5 hodin denně. Po prvních dvou až třech týdnech zvyšujte sílu na 1200–1500 g a zařízení používejte až 12 hodin denně po dobu 3–6 měsíců.
- Pro delší trakci můžete přidat delší tyče.

Důležité upozornění

- Při prvotním používání se může objevit mírná bolestivost způsobená nadměrnou silou.

- Během prvních 2–3 týdnů nepřekračujte sílu 900 g a postupně zvyšujte na doporučené hodnoty. V prvních týdnech zařízení používejte maximálně 4–8 hodin denně a po každé hodině si udělejte přestávku na jemnou masáž penisu.

Přístroj na zvětšení penisu - Uživatelská příručka

- Je normální cítit mírné nepohodlí po dobu 2 hodin používání. Nemějte obavy, toto je známka toho, že tkáně potřebují odpočinek. Sundejte zařízení a masírujte žalud a tělo penisu po dobu dvou minut, poté zařízení opět nasad'te.
- I když obvykle není žádné nepohodlí, některé dny může být váš penis citlivější. Nemějte obavy a pokračujte v používání zařízení. Pokud si všimnete malých bílých oblastí na žaludu, jde o otoky nebo zadržování tekutin způsobené příliš těsnou smyčkou. Masírujte postiženou oblast a otoky zmizí.
- Pokud máte ránu, vřed nebo trpíte pohlavní nemocí, zařízení nepoužívejte, dokud se plně nezhojíte.
- Pokud se na žaludu objeví bílé rány, je nutné navštívit lékaře, protože by mohlo jít o plísňovou infekci.
- Použití léků na podporu růstu vlasů, zesílení vlasů, antidepresiv, prášků na spaní, uklidňujících prostředků nebo sedativ může významně snížit účinnost tohoto zařízení.

Tipy, varování a opatření

- Zařízení na zvětšení penisu by se nemělo používat v následujících situacích: po požití alkoholu, užívání drog, léků proti bolesti nebo diazepamu, při přítomnosti ran, vředů nebo infekcí na penisu, nebo pokud je penis bolestivý, znečitlivělý či pohmožděný.
- Pokud při používání cítíte bolest, znečitlivění nebo zaznamenáte modravý nádech penisu kvůli nesprávnému použití, zařízení sundejte a masírujte penis, abyste odstranili nepohodlí.
- Pokud je zařízení nepohodlné v oblasti žaludu, obalte penis savou vatou.
- Pokud zařízení používáte po přestávce delší než půl měsíce, začněte s minimální trakcí. Po pěti dnech trakci postupně zvyšujte.
- Noste volné spodní prádlo nebo kalhoty při používání zařízení na zvětšení penisu.
- Čistěte zařízení každé tři dny mýdlem a vodou.

- Diabetici by měli mít schválení od svého lékaře a být pod kontrolou.
- Zařízení nepoužívejte při náročném fyzickém cvičení.
- Sundejte zařízení při vyprazdňování nebo močení.
- Pokud zaznamenáte bolest, nepohodlí, modravé zbarvení nebo znecitlivění žaludu, sundejte zařízení a masírujte penis. Penis se vrátí do normálního stavu a nepříjemné pocity zmizí.